

# activ'm®

## PER UN TRATTAMENTO SEMPLICE ED EFFICACE DELLE CICATRICI

*Le cicatrici si riducono, gli arrossamenti ed il prurito si alleviano*

Activ'm è un **CEROTTO ADESIVO** in poliuretano rivestito in silicone che stimola la ricostruzione del tessuto cutaneo, utilizzato per la prevenzione ed il trattamento delle cicatrici; cicatrici formatesi in seguito ad un trauma quale una ferita o ad un intervento chirurgico.

Con Activ'm è possibile diminuire la visibilità delle cicatrici e **RIDURRE IL TESSUTO CICATRIZZATO** che sviluppa una maggiore elasticità e diventa più liscio.

### In quali casi si utilizza Activ'M?

- In caso di **CICATRICI IPERTROFICHE O CHELOIDI** per ottenere un miglioramento dell'aspetto della lesione e/o ridurne le dimensioni.
- A **SCOPO PREVENTIVO** su ferite chiuse in via di guarigione per evitare che si creino cicatrici vistose e/o ipertrofiche.
- Utile anche in caso di **CICATRICI DI VECCHIA DATA** (di oltre 10 anni).



FERITA CHIUSA DA POCO



CICATRICI IPERTROFICHE



CHELOIDE

### Vantaggi

- **ACTIV'M** è molto **SOTTILE**, si adatta perfettamente alle condizioni anatomiche.
- Grazie al **GEL DI SILICONE**, può essere rimosso facilmente in modo **INDOLORE**.
- È un **CEROTTO CONFORTEVOLE, TRASPARENTE** e **FACILE DA UTILIZZARE**.
- Arricchito con **VITAMINA E**, che accelera la guarigione delle ferite e migliora l'esito cicatriziale grazie alle sue proprietà antiossidanti.



1. Morbida pellicola in poliuretano
2. Gel di silicone autoadesivo
3. Pellicola protettiva

### Come si usa Activ'M?

Prima di applicare il cerotto è necessario **DETERGERE** la zona interessata con sapone neutro, quindi lasciarla asciugare. **RITAGLIARE** la porzione necessaria di cerotto Activ'M ed **APPLICARLO** sulla cicatrice facendolo aderire bene alla cute.

**Activ'M** può essere lasciato sulla pelle per **2 o 3 giorni** (giorno e notte) per un periodo massimo di 7 giorni, al termine dei quali è consigliabile applicarne uno nuovo. Il cerotto va comunque sostituito quando i lembi non aderiscono perfettamente alla cute.

I primi **risultati sono visibili dopo circa 3 - 5 settimane**. La durata complessiva del trattamento dipende dalle caratteristiche della cicatrice. Il trattamento prolungato comunque migliorerà il risultato auspicato.



### Disponibilità prodotto

**ACTIV'M** è disponibile in **QUATTRO DIVERSE MISURE** in **CONFEZIONI DA 5 PEZZI**.

- 10x15 cm  924304367
- 4x15 cm  924304342
- 4x30 cm  924304330
- 5x4 cm  924304355





# eurogel Plus®

**MIGLIORA L'ASPETTO DELLE CICATRICI, LASCIANDO SULLA PELLE UNA PIACEVOLE SENSAZIONE SETOSA**

### Per attenuare visibilmente le vostre cicatrici

**EUROGEL PLUS** è un **GEL DI SILICONE** a base di polisilossano formulato per la **PREVENZIONE** ed il **TRATTAMENTO** delle **CICATRICI INFIAMMATE** ed **IPERTROFICHE** e dei **CHELOIDI**.

### Vantaggi

- Silicone innovativo ad effetto opaco **SENZA RESIDUI OLEOSI**.
- **MIGLIORA L'ASPETTO** di vecchie e nuove cicatrici.
- Si **ASCIUGA RAPIDAMENTE, NON UNGE**, è un **GEL SICURO, EFFICACE** ed **INODORE**.
- **APPLICABILE SU TUTTE LE SUPERFICI CUTANEE**, forma sulla pelle una pellicola protettiva ed invisibile.
- **NESSUN RISCHIO DI MACERAZIONE**.
- Consigliato anche **PER I BAMBINI**.
- **COMPATIBILE CON L'USO DI COSMETICI** come il trucco.

### Come si usa Eurogel Plus?

- Applicare il gel **2 VOLTE AL GIORNO**, mattina e sera.
- **DETERGERE ED ASCIUGARE ACCURATAMENTE LA CICATRICE** prima di ogni applicazione.
- Applicare una **PICCOLA QUANTITÀ DI GEL** senza massaggiare.
- **LASCIARE ASCIUGARE PER ALCUNI MINUTI**.
- Si consiglia di prolungare il **TRATTAMENTO PER 2 o 3 MESI**; Il trattamento di una cicatrice può richiedere **FINO A 1 ANNO**.



Eurogel Plus è disponibile nel formato da 20ml



930213905

modelliamo il tuo corpo  
**CRhealth**

*Distributore per l'Italia*

 Marena  
RECOVERY

 Marena  
SHAPE

 Marena  
SPORT

activ'**m**<sup>®</sup>

eurogel<sup>Plus</sup><sup>®</sup>

modelliamo il tuo corpo  
**CRhealth**

**CR-Health s.r.l.**  
*Distributore per l'Italia*

VIA PASQUALE TENGA, 39 - 81100 CASERTA  
TEL. +39 0823 361526 - FAX +39 0823 361815  
info@crhealth.it

[www.crhealth.it](http://www.crhealth.it)

5 www.knprogress | www.knprogress.com

La tua *seconda pelle*



activ'**m**<sup>®</sup>



eurogel<sup>Plus</sup><sup>®</sup>